



Ausgabestand der Gebrauchsanweisung: 18.04.2024

Hersteller



SFM Hospital Products GmbH
Segelfliegerdamm 67-89
12487 Berlin

Produkte

TAP-ATPNW

| UDI-DI Artikel Nr. | Artikel Bezeichnung |
|--------------------|---|
| 4036534530054 | Vliesstoff, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 1,25x 5m |
| 4036534530061 | Vliesstoff, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 1,25x 5m |
| 4036534530078 | Vliesstoff, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 1,25x 5m |
| 4036534531051 | Vliesstoff, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 2,5x 5m |
| 4036534531068 | Vliesstoff, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 2,5x 5m |
| 4036534531075 | Vliesstoff, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 2,5x 5m |
| 4036534532058 | Vliesstoff, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534532065 | Vliesstoff, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534532072 | Vliesstoff, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534533055 | Vliesstoff, Rolle mit Papierbox, 1,25x 5m |
| 4036534533062 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 1,25x 5m |
| 4036534533079 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 1,25x 5m |
| 4036534534052 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 2,5x 5m |
| 4036534534069 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 2,5x 5m |
| 4036534534076 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 2,5x 5m |
| 4036534535059 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 5x 5m |
| 4036534535066 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 5x 5m |
| 4036534535073 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 5x 5m |
| 4036534536056 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 1x 5m |
| 4036534536063 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 1x 5m |
| 4036534536070 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 1x 5m |
| 4036534537053 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 2x 5m |
| 4036534537060 | Vliesstoff, Rolle mit Pappkarton, 2x 5m |
| 4036534537077 | Vliesstoff, Rolle mit Papierkarton, 2x 5m |



TAP-ATPSS

| UDI-DI Artikel Nr. | Artikel Bezeichnung |
|--------------------|---|
| 4036534560051 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 1,25x 5m |
| 4036534560068 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 1,25x 5m |
| 4036534560075 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 1,25x 5m |
| 4036534561058 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 2,5x 5m |
| 4036534561065 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 2,5x 5m |
| 4036534561072 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 2,5x 5m |
| 4036534562055 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534562062 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534562079 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534800058 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534800065 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x5m |
| 4036534800072 | Seidenpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x5m |

TAP-ATPZO

| UDI-DI Artikel Nr. | Artikel Bezeichnung |
|--------------------|--------------------------------|
| 4036534500057 | Zinkoxidpflaster, 1cm x 2,5m |
| 4036534500064 | Zinkoxidpflaster, 1 cm x 2,5 m |
| 4036534500071 | Zinkoxidpflaster, 1 cm x 2,5 m |
| 4036534501054 | Zinkoxidpflaster, 2 cm x 2,5 m |
| 4036534501061 | Zinkoxidpflaster, 2 cm x 2,5 m |
| 4036534501078 | Zinkoxidpflaster, 2 cm x 2,5 m |
| 4036534502051 | Zinkoxidpflaster, 3 cm x 2,5 m |
| 4036534502068 | Zinkoxidpflaster, 3 cm x 2,5 m |
| 4036534502075 | Zinkoxidpflaster, 3 cm x 2,5 m |
| 4036534503058 | Zinkoxidpflaster, 4 cm x 2,5 m |
| 4036534503065 | Zinkoxidpflaster, 4 cm x 2,5 m |
| 4036534503072 | Zinkoxidpflaster, 4 cm x 2,5 m |
| 4036534504055 | Zinkoxidpflaster, 5 cm x 2,5 m |
| 4036534504062 | Zinkoxidpflaster, 5 cm x 2,5 m |
| 4036534504079 | Zinkoxidpflaster, 5 cm x 2,5 m |
| 4036534510056 | Zinkoxidpflaster, 1cm x 5,0m |
| 4036534510063 | Zinkoxidpflaster, 1cm x 5,0m |
| 4036534510070 | Zinkoxidpflaster, 1cm x 5,0m |
| 4036534511053 | Zinkoxidpflaster, 2cm x 5,0m |



Gebrauchsanweisung

| UDI-DI Artikel Nr. | Artikel Bezeichnung |
|--------------------|---|
| 4036534511060 | Zinkoxidpflaster, 2cm x 5,0m |
| 4036534511077 | Zinkoxidpflaster, 2cm x 5,0m |
| 4036534512050 | Zinkoxidpflaster, 3cm x 5,0m |
| 4036534512067 | Zinkoxidpflaster, 3cm x 5,0m |
| 4036534512074 | Zinkoxidpflaster, 3cm x 5,0m |
| 4036534513057 | Zinkoxidpflaster, 4cm x 5,0m |
| 4036534513064 | Zinkoxidpflaster, 4cm x 5,0m |
| 4036534513071 | Zinkoxidpflaster, 4cm x 5,0m |
| 4036534514054 | Zinkoxidpflaster, 5cm x 5,0m |
| 4036534514061 | Zinkoxidpflaster, 5cm x 5,0m |
| 4036534514078 | Zinkoxidpflaster, 5 cm x 5,0 m |
| 4036534520055 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 1,25 cm x 5m |
| 4036534520062 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 1,25 cm x 5 m |
| 4036534520079 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 1,25 cm x 5 m |
| 4036534521052 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 2 cm x 2,5m |
| 4036534521069 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 2 cm x 2,5m |
| 4036534521076 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 2 cm x 2,5m |
| 4036534522059 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 2 cm x 5 m |
| 4036534522066 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 2 cm x 5 m |
| 4036534522073 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 2 cm x 5 m |
| 4036534523056 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 3 cm x 2,5m |
| 4036534523063 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 3 cm x 2,5m |
| 4036534523070 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 3 cm x 2,5m |
| 4036534524053 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 3 cm x 5 m |
| 4036534524060 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 3 cm x 5 m |
| 4036534524077 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 3 cm x 5 m |
| 4036534525050 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 5 cm x 5 m |
| 4036534525067 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 5 cm x 5 m |
| 4036534525074 | Zinkoxidpflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung 5 cm x 5 m |



TAP-ATPPE

| UDI-DI Artikel Nr. | Artikel Bezeichnung |
|--------------------|--|
| 4036534550052 | PE Pflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 1,25x 5m |
| 4036534550069 | PE Pflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 1,25x 5m |
| 4036534550076 | PE Pflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 1,25x 5m |
| 4036534551059 | PE Pflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 2,5x 5m |
| 4036534551066 | PE Pflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 2,5x 5m |
| 4036534551073 | PE Pflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 2,5x 5m |
| 4036534552056 | PE Pflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534552063 | PE Pflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534552070 | PE Pflaster, Rolle mit Kunststoffabdeckung, 5x 5m |
| 4036534553053 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 1,25x 5m |
| 4036534553060 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 1,25x 5m |
| 4036534553077 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 1,25x 5m |
| 4036534554050 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 2,5x 5m |
| 4036534554067 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 2,5x 5m |
| 4036534554074 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 2,5x 5m |
| 4036534555057 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 5x 5m |
| 4036534555064 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 5x 5m |
| 4036534555071 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 5x 5m |
| 4036534556054 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 1x 5m |
| 4036534556061 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 1x 5m |
| 4036534556078 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 1x 5m |
| 4036534557051 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 2x 5m |
| 4036534557068 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 2x 5m |
| 4036534557075 | PE Pflaster, Rolle mit Pappkarton, 2x 5m |



Zweckbestimmung

Das Heftpflaster ist ein nicht steriles, zum Einmalgebrauch bestimmtes Medizinprodukt, das zur Fixierung von Medizinprodukten am Patienten auf intakter Haut verwendet wird.

Die Anwendung erfolgt sowohl durch Fachpersonal wie auch durch Laien im Klinik-, Praxis- und Pflegealltag.

Indikationen

Heftpflaster werden zur Fixierung weiterer Medizinprodukte (u. A. Katheter, Verbände, usw.) am Patienten verwendet.

Kontraindikationen

Es wurden keine Kontraindikationen identifiziert.

Patientenpopulation

Die Heftpflaster und Kinesiologiepflaster eignen sich zur Anwendung bei Patienten jeden Alters, Gewicht oder (Gesundheits-) Zustand ohne Überempfindlichkeit gegen einen der verwendeten Rohstoffe.

Anwender

Die Heftpflaster und Kinesiologiepflaster werden sowohl von medizinischem Fachpersonal als auch von Laien verwendet.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Auf Unversehrtheit der Verpackung achten!

Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden!

Bei bekannten allergischen Reaktionen auf Acryl oder nach einer Langzeitbehandlung mit Kortison nicht verwenden!

Benutzen Sie das Heftpflaster nicht auf Wunden, Verbrennungsstellen, irritierter Haut, Schleimhäuten, Mund, Nase, und Augen!

Restrisiken

Es wurden keine Restrisiken identifiziert.

Hinweise zur Anwendung

Die Heftpflaster bestehen aus einem hautfreundlichen Trägermaterial und einer Klebeschicht und sind als Rollenpflaster konzipiert. Über die Klebefläche der Heftpflaster werden Wundauflagen oder weitere Medizinprodukte (Katheter, Schläuche) direkt auf der Haut fixiert.



Nicht auf nasser, oder gefetteter Haut auftragen

Das Auftragen auf nasser oder gefetteter Haut kann die korrekte Haftung beeinträchtigen. Die Produkte sind zur einmaligen Verwendung ausgelegt.



Die Haftung des Produkts kann bei mehrmaliger Verwendung beeinträchtigt werden

Das Abziehen des Heftpflasters kann unter Umständen aufgrund der Haftung des Klebers auf der Haut zu leichten Schmerzen führen.

Verwendete graphische Symbole



Hersteller



Temperaturbegrenzung



Herstelldatum



Trocken aufbewahren



Verwendbar bis



Von Sonnenlicht fernhalten



Fertigungsnummer, Charge



Warnung, Warnhinweis



Artikelnummer



Kennzeichnung als
Medizinprodukt



Datenelemente der UDI -
Codierung in für Menschen
lesbarer Form



Lagerbedingungen und Transport

Die Lagerung und der Transport sollten sachgerecht in Kartons bei Temperaturen zwischen +15 °C und +25 °C erfolgen.

Vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung

Nach Gebrauch oder nach Ablauf des Verfallsdatums sind die Heftpflaster fachgerecht zu entsorgen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden über Entsorgungsvorschriften für medizinische Einwegprodukte.

Meldung von Vorkommnissen

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind SFM und der zuständigen Behörde zu melden. Bitte gehen Sie für Meldungen an SFM dazu auf www.sfm-berlin.de in den Bereich „Rückmeldungen“.