



Ausgabestand der Gebrauchsanweisung: 18.04.2024

Hersteller



SFM Hospital Products GmbH
Segelfliegerdamm 67-89
12487 Berlin

Produkte

TAP-KTP

UDI-DI Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung
4036534082058	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5m, Haut
4036534082065	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5m, Haut
4036534082072	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, Haut
4036534083055	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, blau
4036534083062	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, blau
4036534083079	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, blau
4036534084052	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, rosa
4036534084069	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, rosa
4036534084076	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, rosa
4036534085059	Kinesiopflaster, Rolle in Pappschachtel, 2,5 cm x 5 m, schwarz
4036534085066	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, schwarz
4036534085073	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5m, schwarz
4036534086056	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, gelb
4036534086063	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, gelb
4036534086070	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5m, gelb
4036534087053	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, grün
4036534087060	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, grün
4036534087077	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, grün
4036534088050	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, orange
4036534088067	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, orange
4036534088074	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5m, orange
4036534089057	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5m, violett
4036534089064	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5m, violett
4036534089071	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 2,5 cm x 5 m, violett
4036534820056	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, haut
4036534820063	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, Haut



Gebrauchsanweisung

UDI-DI Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung
4036534820070	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, Haut
4036534821053	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, schwarz
4036534821060	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, schwarz
4036534821077	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, schwarz
4036534822050	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, blau
4036534822067	Kinesiopflaster, Rolle in Pappschachtel, 5 cm x 5 m, blau
4036534822074	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, blau
4036534823057	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, rosa
4036534823064	Kinesiopflaster, Rolle in Pappschachtel, 5 cm x 5 m, rosa
4036534823071	Kinesiopflaster, Rolle in Pappschachtel, 5 cm x 5 m, rosa
4036534824054	Kinesiopflaster, Rolle in Pappschachtel, 5 cm x 5 m, gelb
4036534824061	Kinesiopflaster, Rolle in Pappschachtel, 5 cm x 5 m, gelb
4036534824078	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, gelb
4036534825051	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, grün
4036534825068	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, grün
4036534825075	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, grün
4036534826058	Kinesiologie-Tape, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett
4036534826065	Kinesiologie-Tape, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett
4036534826072	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett
4036534827055	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett
4036534827062	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett
4036534827079	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett
4036534828052	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, hautähnlich
4036534828069	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, Haut Mighty
4036534828076	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, Haut Mighty
4036534829059	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, schwarz Mighty
4036534829066	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, schwarz Mighty
4036534829073	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, schwarz Mighty
4036534830055	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, blau Mighty
4036534830062	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, blau Mighty
4036534830079	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, blau Mighty
4036534831052	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, rosa Mighty
4036534831069	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, rosa Mighty
4036534831076	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, rosa Mighty
4036534832059	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, gelb Mighty
4036534832066	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, gelb Mighty



Gebrauchsanweisung

UDI-DI Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung
4036534832073	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, gelb Mighty
4036534833056	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, grün Mighty
4036534833063	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, grün Mighty
4036534833070	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, grün Mighty
4036534834053	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett Mighty
4036534834060	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett Mighty
4036534834077	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett Mighty
4036534835050	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5m, orange Mighty
4036534835067	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, orange Mighty
4036534835074	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, orange Mighty
4036534844052	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, haut Mighty
4036534844069	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, haut Mighty
4036534845059	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, schwarz Mighty
4036534845066	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, schwarz Mighty
4036534846056	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, blau Mighty
4036534846063	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, blau Mighty
4036534847053	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, rosa Mighty
4036534847060	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, rosa Mighty
4036534848050	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, gelb Mighty
4036534848067	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, gelb Mighty
4036534849057	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, grün Mighty
4036534849064	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, grün Mighty
4036534850053	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, violett Mighty
4036534850060	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, violett Mighty
4036534851050	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, orange Mighty
4036534851067	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 32m, orange Mighty
4036534855058	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, rosa, synthetisch Mighty
4036534855065	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, rosa, synthetisch Mighty
4036534855072	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5m, rosa, synthetisch Mighty
4036534861059	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, Haut, synthetisch
4036534861066	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, Haut, synthetisch
4036534861073	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, Haut, synthetisch
4036534862056	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, schwarz, synthetisch
4036534862063	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, schwarz, synthetisch
4036534862070	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, schwarz, synthetisch
4036534863053	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, blau, synthetisch



Gebrauchsanweisung

UDI-DI Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung
4036534863060	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, blau, synthetisch
4036534863077	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, blau, synthetisch
4036534864050	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, rosa, synthetisch
4036534864067	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, rosa, synthetisch
4036534864074	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, rosa, synthetisch
4036534865057	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, gelb, synthetisch
4036534865064	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, gelb, synthetisch
4036534865071	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, gelb, synthetisch
4036534866054	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, grün, synthetisch
4036534866061	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, grün, synthetisch
4036534866078	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, grün, synthetisch
4036534867051	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett, synthetisch
4036534867068	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett, synthetisch
4036534867075	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, violett, synthetisch
4036534868058	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, orange, synthetisch
4036534868065	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, orange, synthetisch
4036534868072	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 5 cm x 5 m, orange, synthetisch
4036534869055	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, Haut
4036534869062	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, Haut
4036534869079	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, Haut
4036534870051	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, schwarz
4036534870068	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, schwarz
4036534870075	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, schwarz
4036534871058	Kinesiopflaster, Rolle in Pappschachtel, 10 cm x 5 m, blau
4036534871065	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, blau
4036534871072	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, blau
4036534872055	Kinesiopflaster, Rolle in Pappschachtel, 10 cm x 5 m, rosa
4036534872062	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, rosa
4036534872079	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, rosa
4036534873052	Kinesiopflaster, Rolle in Pappschachtel, 10 cm x 5 m, gelb
4036534873069	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, gelb
4036534873076	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, gelb
4036534874059	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5m, grün
4036534874066	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, grün
4036534874073	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, grün
4036534875056	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, violett



UDI-DI Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung
4036534875063	Kinesiologie-Tape, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, violett
4036534875070	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, violett
4036534876053	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, orange
4036534876060	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, orange
4036534876077	Kinesiopflaster, Rolle in Papierschachtel, 10 cm x 5 m, orange

Zweckbestimmung

Das Kinesiologiepflaster ist ein nicht steriles, zum Einmalgebrauch bestimmtes Medizinprodukt, das zur Behandlung, Linderung und/oder Kompensierung von Einschränkungen des Bewegungsapparates am Patienten auf intakter Haut verwendet wird.

Die Anwendung erfolgt sowohl durch Fachpersonal wie auch durch Laien im Klinik-, Praxis- und Pflegealltag.

Indikationen

Kinesiologiepflaster werden zur unterstützenden bzw. komplementären Behandlung von Beschwerden oder Verletzungen der Muskeln, Bänder oder Sehnen verwendet.

Kontraindikationen

Es wurden keine Kontraindikationen identifiziert.

Patientenpopulation

Die Kinesiologiepflaster eignen sich zur Anwendung bei Patienten jeden Alters, Gewicht oder (Gesundheits-) Zustand ohne Überempfindlichkeit gegen einen der verwendeten Rohstoffe.

Anwender

Die Kinesiologiepflaster werden sowohl von medizinischem Fachpersonal als auch von Laien verwendet.



Allgemeine Sicherheitshinweise

Auf Unversehrtheit der Verpackung achten!

Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden!

Bei bekannten allergischen Reaktionen auf Acryl oder nach einer Langzeitbehandlung mit Kortison nicht verwenden!

Benutzen Sie das Heftpflaster nicht auf Wunden, Verbrennungsstellen, irritierter Haut, Schleimhäuten, Mund, Nase, und Augen!

Restrisiken

Es wurden keine Restrisiken identifiziert.

Hinweise zur Anwendung

Die Kinesiologiepflaster bestehen aus einem hautfreundlichen Trägermaterial und einer Klebeschicht und sind als Rollenpflaster konzipiert. Über die Klebefläche der Kinesiologiepflaster wird dieses auf der beeinträchtigten Stelle des Bewegungsapparates angebracht.



Nicht auf nasser, oder gefetteter Haut auftragen

Das Auftragen auf nasser oder gefetteter Haut kann die korrekte Haftung beeinträchtigen. Die Produkte sind zur einmaligen Verwendung ausgelegt.



Die Haftung des Produkts kann bei mehrmaliger Verwendung beeinträchtigt werden

Das Abziehen des Kinesiologiepflaster kann unter Umständen aufgrund der Haftung des Klebers auf der Haut zu leichten Schmerzen führen.

Verwendete graphische Symbole



Hersteller



Temperaturbegrenzung



Herstelldatum



Trocken aufbewahren



Verwendbar bis



Von Sonnenlicht fernhalten



Fertigungsnummer, Charge



Warnung, Warnhinweis



Artikelnummer



Kennzeichnung als
Medizinprodukt



Datenelemente der UDI -
Codierung in für Menschen
lesbarer Form



Lagerbedingungen und Transport

Die Lagerung und der Transport sollten sachgerecht in Kartons bei Temperaturen zwischen +15 °C und +25 °C erfolgen.

Vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung

Nach Gebrauch oder nach Ablauf des Verfallsdatums sind die Heftpflaster fachgerecht zu entsorgen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden über Entsorgungsvorschriften für medizinische Einwegprodukte.

Meldung von Vorkommnissen

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind SFM und der zuständigen Behörde zu melden. Bitte gehen Sie für Meldungen an SFM dazu auf www.sfm-berlin.de in den Bereich „Rückmeldungen“.